

## **MEDIDAS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 (CORONAVIRUS) EN SEGURIDAD SAN MARTÍN LTDA – SMartin Ltda. INSTRUCTIVO DEL ADECUADO USO, ALMACENAMIENTO Y DESINFECCIÓN DE TERMÓMETRO**

Desde el área HSEQ y en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST de SMartin Ltda., nos permitimos dar los siguientes lineamientos a TODOS NUESTROS COLABORADORES, para el adecuado uso, almacenamiento y desinfección de su termómetro:



### ✓ **Antes de usar su termómetro**

Realice una correcta higiene de manos con abundante agua y jabón.

### ✓ **Saque el termómetro de su lugar de almacenamiento**

Asegúrese que el termómetro se encuentra almacenado en un lugar libre de humedad o expuesto al sol.



### ✓ **Desinfecte su termómetro antes de usar**

Realice esta acción de desinfección cuando vaya a usar su termómetro, tome una toalla o papel desechable e imprégnela de alcohol y limpie toda la superficie de este.

### ✓ **Para tomar la temperatura**

1. Encienda su termómetro
2. Cuando el termómetro pite, está listo para ser usado
3. Coloque la punta de la sonda bajo el brazo (axila)
4. Manténgalo aproximadamente por un minuto debajo del brazo
5. Cuando pite la temperatura estará tomada
6. Apague su termómetro después de usarlo





✓ **Antes de almacenar desinfecte su termómetro**

Realice desinfección inmediatamente después de hacer uso de su termómetro, tomando una toalla o papel desechable e impregnándola de alcohol y limpiando toda la superficie de este antes de guardarlo en su empaque original o en un lugar donde no vaya a sufrir daño.

✓ **Almacenamiento del termómetro**

Una vez haya dado uso del termómetro y lo haya desinfectado recuerde almacenar su termómetro en un lugar seco, libre humedad o exposición a altas temperaturas.

**NO OLVIDE QUE EL TERMÓMETRO ASIGNADO ES DE USO PERSONAL.**



✓ **Errores que NO debe cometer con el uso de su termómetro**

1. Golpear el termómetro
2. Jugar con el termómetro
3. Exponerlo al sol, zonas húmedas o al polvo
4. Lavar el termómetro con agua
5. Desmontar la unidad, excepto para reemplazar la batería
6. Usarlo de forma intermitente y guardarlo en el bolsillo de alguna prenda de vestir sin almacenar adecuadamente

Área HSEQ  
Seguridad San Martín Ltda. – SMartin Ltda.  
Tel.: 744 8513 Ext. 1153  
Mayo de 2020